

Gyári szám:


Értékesítés dátuma:

Aláírás/PH.

Kezelési útmutató az

Elektronikus masszírozó készülékhez

AD-2100 típus

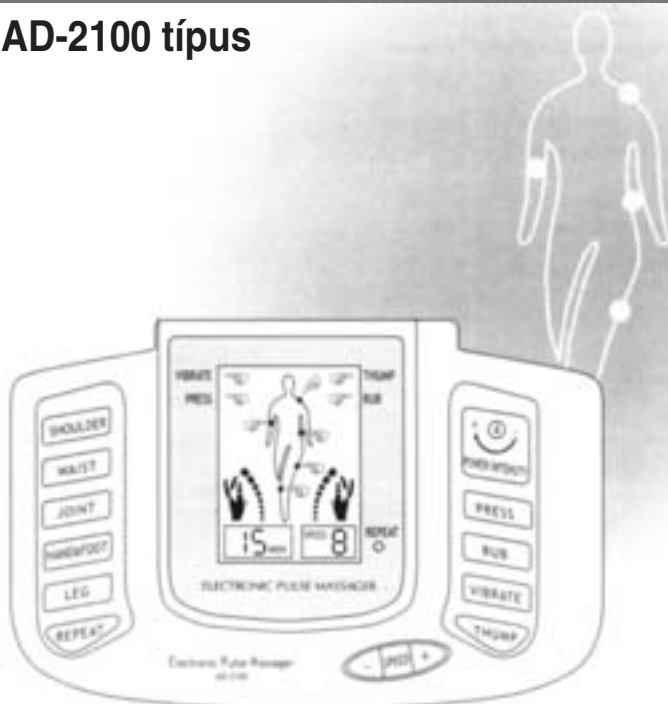

CE0197

Forgalmazza és szervizeli: MEDICOR Elektronika Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 9.)


5.695.0056.00.9a

Elektronikus Masszírozó Készülék

AD-2100 típus

Kezelési Útmutató

- Köszönjük, hogy az AD-2100 típusú elektronikus masszírozót választotta.
- A készülék rendeltetésszerű használata érdekében kérjük, a használat előtt alaposan tanulmányozza a Kezelési Útmutatót.
- A készülék biztonságos használata érdekében ismerkedjen meg a biztonsági előírásokkal.
- Tartsa meg a Kezelési Útmutatót és a Garanciális Jótállási Jegyet.

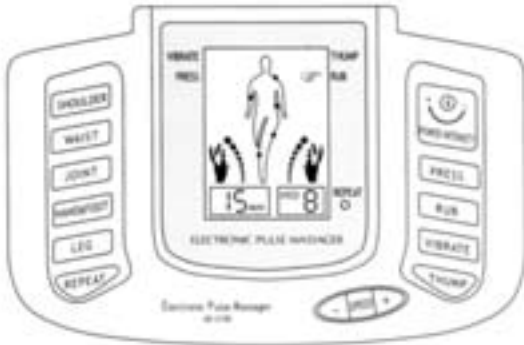

Tartalom

Az Elektronikus masszírozó készülék rövid bemutatása

- ⊙ Az AD-2100 készülék jellemzői 3
- ⊙ Az elektronikus masszírozó készülék rendeltetése és hatása 3
- ⊙ Az elektronikus masszírozó készülék hatásmechanizmusa 4
- ⊙ Az elektronikus masszírozó készülék felépítése, az egyes részek funkciói 5

Biztonsági előírások 7

A készülék működtetése

- ⊙ Előkészítés használatra 8
- ⊙ A készülék használata 10
- ⊙ Karbantartás használat után 15

Üzemzavarok és megoldások 16

Műszaki paraméterek 16

A lapelektródák elhelyezési pontjai 17

Jótállási jegy 23

A szerviz megközelítése 24

Elektronikus Masszírozó Készülék

Az AD-2100 típusú elektronikus masszírozó készülék jellemzői

1. A készülék 3db 1,5V AA típusú szárazelemmel, vagy a tartozékként szállított AC 230V/DC 4V adapterrel működik. A készülék nagy teljesítménye miatt erős gyógyító hatás kifejtésére képes.
2. A masszírozás intenzitása tetszés szerint állítható.
3. A masszírozás sebessége is tetszés szerint állítható (a sebesség beállítása mechanikusan történik).
4. Minden kezelés külön gombbal állítható.
5. A készülék használatának megtanulása és működtetése egyszerű.
6. A megfelelő terápiás hatást az elektromos impulzusok és a hullámhossz automatikus váltokozása biztosítja.
7. A készülék hatféle üzemmódban, sokféle variációban működtethető.
8. Az ismételő funkció segítségével tetszés szerint választhat a számos automatikus kezelési mód közül.
9. A nagyméretű folyadékkristályos kijelzőn tisztán láthatók a kezelt területekkel kapcsolatos információk.
10. A folyadékkristályos kijelzőn látható a kezelésből még hátralévő idő. A folyadékkristályos kijelzőn lehetőség van a kezelési sebesség megjelenítésére is.
11. A készülék automata kikapcsolás funkcióval rendelkezik, azaz 15 perc kezelés után a készülék automatikusan kikapcsol.
12. A készülék 5 másodpercen belül kikapcsol, ha az elektródák elmozdulnak a bőrfelületről.
13. A készülék lepelektrodáiba infravörös sugárzó anyag van beépítve. Az elektródák gyártásához felhasznált korszerű technológia teszi ezt lehetővé. Az infravörös anyag 5-15µm hullámhosszon tud elektromágneses hullámokat kibocsátani, amelyek az alábbi kedvező hatással vannak az emberi testre:
 - a. Az elektródák aszeptikus hatásúak, így a test különböző pontjaira való felhelyezéskor a fertőzés elkerülhető.
 - b. Javul a helyi keringés, a vérkeringés és az anyagcsere folyamatok.

Az elektronikus masszírozó készülék rendeltetése és hatása

A készülék alkalmas nyaki csigolyabántalmak, a hátgerinc ízületi gyulladásai, a keresztcsont körüli izomfájdalmak csillapítására és terápiájára.

- ⊙ a készülék csökkenti a nyaki csigolyafájdalmat, a váll és a lapocka ízületi gyulladása és az ízületi gyulladás miatti fájdalomérzetet, az ágyéktáji izomfájdalmakat
- ⊙ csillapítja a perifériás izomgörcsöket
- ⊙ enyhíti az izomfájdalmat
- ⊙ javítja a vérkeringést
- ⊙ csökkenti a fáradtságérzést

Elektronikus Masszírozó Készülék

Az elektronikus masszírozó készülék hatásmechanizmusa

A készülék alacsony hullámhosszon, gyenge áramimpulzusok segítségével gyakorol hatást az emberi testre, javítja a vérkeringést, stimulálja az idegrendszer működését. Ezáltal a készülék alkalmas fáradtság csillapítására, görcsök, fájdalom és gyulladások kezelésére.

Az alacsony hullámhosszon, gyenge áramimpulzusokkal végzett terápiának kétféle hatása van az emberi testre, ezeket közvetlen és reflex hatásoknak nevezzük.

A motorikus izmoknak alacsony áramimpulzusokkal végzett stimulációja következtében létrejött izomösszehúzódasók a közvetlen hatás eredményeként jönnek létre.

Reflex hatásnak nevezzük azt a reakciót, amely során a gyenge áramimpulzusokkal végzett külső stimuláció alatt számos idegreceptor jut ingerhez, az inger pedig azonnal továbbhalad az idegrendszerben. Az inger először az izomrostokon halad át, majd eljut a megfelelő gerincrészhez, majd a gerincvelő hátsó és oldalsó idegkötegeiből feljut az agytörzsbe vagy a kéreg alatti központba, majd a két agyféltekébe, ahol az agy értelmezi az ingert.

Ezután centrifugális impulzus indul a mozgató idegeken át a törzs, a zsigerek és a mirigyek felé. Ennek a folyamatnak számos hatása ismert.


Az emberi test reakciója a külső stimulációra adott bizonyos válasz, valamint a testnek a külső környezethez való alkalmazkodását fejezi ki. A test reakciója az ideg- és testnedvek közös munkájának eredménye.

Fájdalomérzet fellépésekor nagy szerepe van a kémiai vivőanyagoknak. A sejtek sérülésekor káliumionok és hisztaminok szabadulnak fel, a fehérje felbomlásakor kassinin kinin jön létre. Ha ezek az ún. 'P' anyagok és az 5-hydroxytryptophane, ezen kívül az acid metabolite megfelelő koncentrációt érnek el az idegrendszer működése közben, fájdalomérzet keletkezik. A helyi vérkeringés javításával ezeket a fájdalmat okozó anyagokat gyorsan ki lehet mosni az izomból, ez megszünteti vagy csökkenti a fájdalomérzetet.

A hosszabb ideig tartó stimuláció ezen kívül elősegítheti olyan fájdalomcsillapító fehérjék termelését (pld. endorfin vagy enkephalin), amelyeknek a fájdalom csillapítása mellett nyugtató hatása is ismert.

Elektronikus Masszírozó Készülék

Az elektronikus masszírozó készülék részei

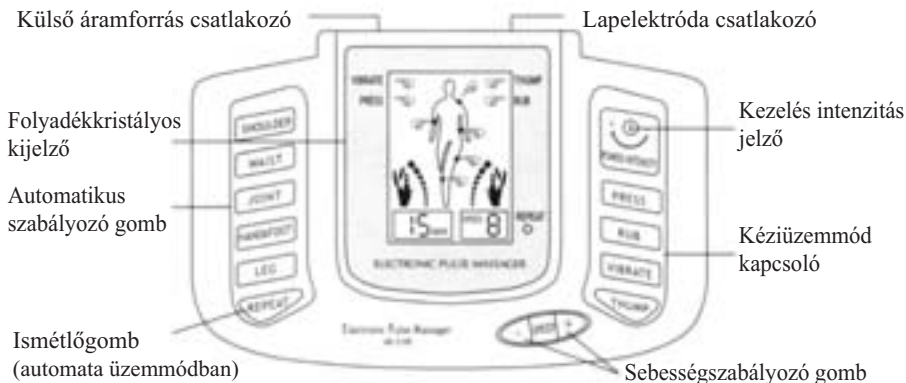

Ki/bekapcsoló gomb és intenzitást szabályozó gomb



© A folyadékkristályos kijelzőn megjelenő szimbólumok

a „vibrálás” gomb használatakor látható a képernyőn

a „nyomkodás” gomb használatakor látható a képernyőn

A karon látható szimbólum a „Kéz és lábfej” kezelés bekapcsolásakor jelenik meg a kijelzőn.

A térdén látható szimbólum az „Ízületek” kezelés bekapcsolásakor jelenik meg a kijelzőn.

A kijelző bal alsó sarkában látható a kezelésből fennmaradó idő



az „ütögetés” gomb használatakor látható a képernyőn

a „masszírozás” gomb használatakor látható a képernyőn

A vállon látható szimbólum a „Vállak” kezelés bekapcsolásakor jelenik meg a kijelzőn.

A derékon látható szimbólum a „Derék” kezelés bekapcsolásakor jelenik meg a kijelzőn.

A combon látható szimbólum a „Láb” kezelés bekapcsolásakor jelenik meg a kijelzőn.

A kijelző jobb alsó szélén található az Ismétlésjelző fény

A kijelző jobb alsó sarkában látható a kiválasztott kezelési sebesség (1-9 skálán)



Biztonsági előírások

A Biztonsági Figyelmeztetések pontjai

A „Biztonsági Figyelmeztetések pontjai” alatt rögzítve van, hogy a masszírozó készülék helytelen használata káros és veszélyes lehet

Az Ön biztonsága érdekében kérjük, gondosan kövesse az előírásokat

Rajzjelek és grafikus jelzések

-  Jelzi a nem megengedett alkalmazást
-  jelzi a tiltott alkalmazást, illetve a vonatkozó előírásokat

Veszélyes

Kérjük, egyáltalán ne használja az alább felsorolt elektronikus gyógyászati berendezéseket, eszközöket a masszírozó készülékkel együtt:

- (1) pulzus szabályozó, vagy egyéb, a testbe beépített elektronikus gyógyászati eszközök, készülékek,
 - (2) mesterséges szív- légzőszervi pacemaker, vagy egyéb, az élet fenntartása érdekében használt elektronikus gyógyászati eszköz, készülék,
 - (3) EKG készülék, vagy egyéb, a páciens által viselt elektronikus gyógyászati készülék.
- A fent felsorolt elektronikus gyógyászati készülékeknek a masszírozó készülékkel történő együttes használata a helytelen alkalmazás során veszélyes lehet



Figyelmeztetés

☉ Az alábbiakban felsorolt személyek, illetve azok, akik gyógykezelés alatt állnak, az orvos egyetértése nélkül ne használják a masszírozó készüléket:

- (1) akut betegségben szenvedők
 - (2) rosszindulatú daganatos betegek
 - (3) fertőző betegségben szenvedők
 - (4) azok, akik éppen menstruációs, illetve terhességi időszakot élnek át
 - (5) szívbetegek
 - (6) magas lázban szenvedők
 - (7) rendellenes vérnyomással bíró személyek
 - (8) érzékeny bőrfelülettel rendelkező páciensek, vagy bőrbetegségben szenvedők
 - (9) a fent említettek mellett azok a személyek, akiknek a testén rendkívüli érzékelő felület található
- Ellenkező esetben a készülék használata kellemetlenséget, rosszzullétet okozhat



☉ Kérjük, ne használja a készüléket a szív, a fej, az arc, a szájjüreg, valamint az intim szervek masszírozására. Ellenkező esetben kellemetlenség, rosszzullét következhet be.

☉ Kérjük, ne használja a készüléket más gyógyászati készülékkel, vagy aktuálisan használt gyógyászati eszközzel együtt. Ellenkező esetben kellemetlenség, rosszzullét következhet be.



☉ Kérjük, hogy az elektróda vezeték dugóját a masszírozó készülék csatlakozóján kívül máshová ne csatlakoztassa. Ellenkező esetben kellemetlenség, vagy elektromos sokk következhet be.

☉ Kérjük, hogy saját kezűleg ne szedje szét, ne javítsa, ill. ne alakítsa át a masszírozó készüléket. Ellenkező esetben baleset, vagy meghibásodás következhet be.

Megjegyzések

☉ Amennyiben a masszírozó készülék használata során rosszul érezné magát, vagy a bőrén rendellenességet észlelné, úgy kérje ki az orvosa tanácsát és kövesse azt.

☉ Mielőtt a készülék használata közben a lapelektrodákat más pozícióba helyezné át, feltétlenül kapcsolja ki a készülék tápellátását.



☉ Kérjük, ne engedje, hogy gyermekek, vagy beszámíthatatlan személyek használják a masszírozó készüléket. Ne helyezze azt el könnyen elérhető helyre. Ellenkező esetben ez kellemetlenséghez vezethet, illetve valakinek rosszzullétet okozhat.

☉ Kérjük, ne használja a készüléket a fürdőszobában, vagy egyéb, magas páratartalmú helyiségben. Ellenkező esetben erős áramütést kaphat.

☉ Kérjük, ne használja a készüléket autózvezetés közben. Ellenkező esetben ez balesethez vezethet.



☉ Kérjük, ne használja a készüléket alvás közben.

☉ Kérjük, a kezelés folyamán ügyeljen arra, hogy fémből, vagy borból készült övek, karóra, ill. nyaklánc ne érintkezzenek a lapelektrodákkal.

☉ Kérjük, a készüléket a kezelésen kívül más célra ne használja.

☉ Kérjük, ne dobja az elemeket tűzbe.


Helyes használat

Előkészítés a masszírózó használatára


A készülék 3 db 1,5V-os AA típusú elemmel, vagy DC4V AC adapterrel működtethető.

© Az elemek behelyezése


1. Nyissa ki az elemtartó fedelét a nyíl irányában.

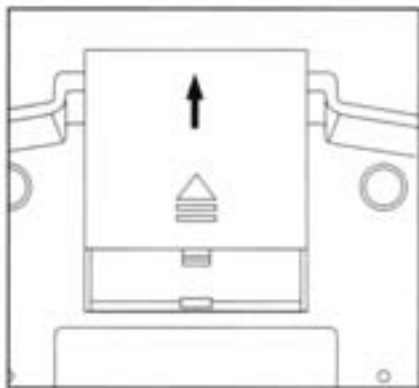

2. Az elemek behelyezése előtt figyeljen a polaritásra.

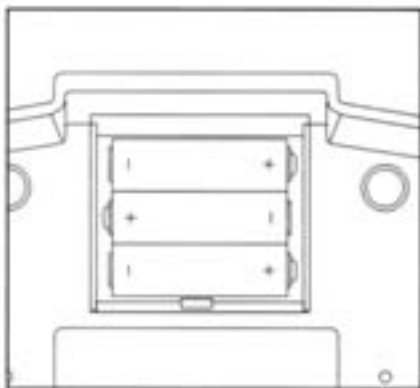


3. Zárja vissza az elemtartó fedelét.

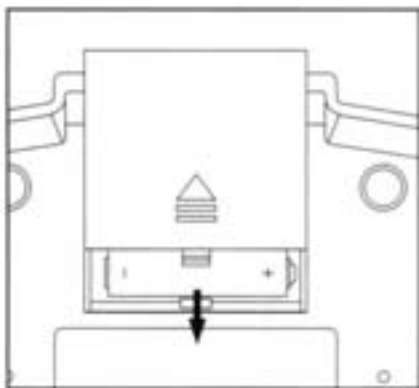

Megjegyzés: csak DC4V egészségügyi célokra használható adapter alkalmazható (ábra a jobb oldalon).

* Csak a készülékhez adott váltakozó áramú adaptert használja, amely megfelel az egészségügyi biztonsági előírásoknak.

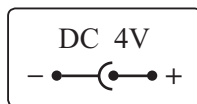


Helyes használat

Előkészítés a masszírozó használatára

⊙ Az elektródakábel csatlakoztatása

1. A kábel egyik végén található csatlakozót kapcsolja az alapegység elektródacsatlakozójához.
2. A kábel másik végén található csatlakozókat csatlakoztassa a lapelektrodákhoz.

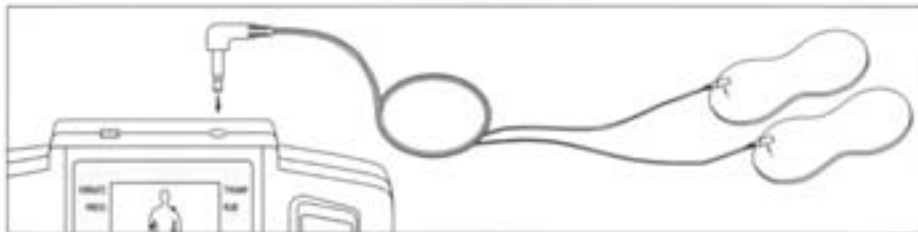

Az elektródakábel használata

- ⊙ Kerülje a kábel túl nagy erővel való megfeszítését, ne hajtogassa a kábelt.
- ⊙ Az alapegységből való kihúzásakor tartsa kézben a csatlakozót.

⊙ Az elektródák használata

1. A készülék első használata előtt távolítsa el az elektródákról a védőfóliát.
2. A lapelektrodákat a fájdalmas testrészekhez közel helyezze fel.



Lapelektrodák használata

Egyszerre két darab lapelektrodát kell használnia, különben a kezelés nem lesz gyógyító hatású. Egyébként a két lapelektroda nem fedheti át egymást a kezelendő felületen.

Ne helyezze fel az elektródákat a bőrfelületre a készülék bekapcsolása után, különben erős áramütést kaphat.

Kérjük, hogy amennyire lehetséges, ne érintse meg kézzel a lapelektrodák tapadó felületét.

A készülék használata előtt, zuhanyozás után, ill. izzadás esetén törölje meg a kezelendő felületet.

Kérjük, használjon ragasztószalagot az elektródák rögzítésére abban az esetben, ha azok – a különböző elhelyezésektől függően – nem tapadnának eléggé a bőrfelületre.

Kérjük, hogy a fertőzések, ill. bőrbetegségek elkerülése érdekében ne keverje össze az elektródákat más által használt elektródákkal

Megjegyzés: az elektródák kicserélhetők. Használja az elektródákat előírászerűen. Cserélje ki újakra az elektródákat, ha működésükben zavart észlel.

A masszírozó használata


© Kezelési normák

- A kezelés ideje: Egy ponton a 10-15 perces kezelési idő a megfelelő.
- A kezelés gyakorisága: Napi egy-két alkalom elegendő.
- Intenzitás: A kezelés intenzitását tetszés szerint állíthatja be.
- Sebesség: Az Önnek legkényelmesebb intenzitásra állítsa be a sebességet.

☛ A kezelés megkezdésekor az első néhány napon lassabban és kisebb intenzitással használja a készüléket.

© 1. A készülék bekapcsolása

A készülék bekapcsolásakor hangjelzést fog hallani.

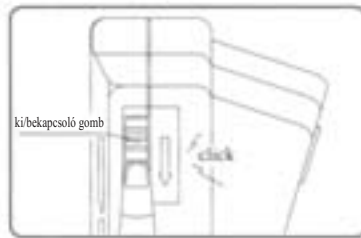

Ezután a folyadékkristályos kijelző kb. 1 másodpercig villog.



Megjegyzés:

- ☛ Könnyű masszírozó kezdő program A túl erős stimuláció elkerülésére az alapegység enyhe masszírozó kezeléssel indítja a programot.
- ☛ Amennyiben a bekapcsolás után 5 másodpercen belül 3 hangjelzést hall, majd a folyadékkristályos kijelző elsötétül, a készülék biztonsági üzemmódba kapcsol, mivel az elektródák nem csatlakoznak megfelelően. Ellenőrizze az elektródák csatlakozását az alapegységhez, vagy helyezze az elektródákat szorosan a testére, majd kezdje újra a programot a készülék bekapcsolásával.
- ☛ A bekapcsolás után 15 perccel a készülék automatikusan kikapcsol.
- ☛ Ha a lapelektrodák elmozdulnak a bőrfelületről, 5 másodpercen belül automatikusan leáll a működés.

A masszírozó használata

2. A megfelelő kezelési mód kiválasztása

Automata kezelési módok esetén választható funkciók: a váll, a derék, a kéz és lábfej, a lábszár és kar és az ízületek.

Manuális kezelési mód esetén választható funkciók: nyomkodás, masszírozás, ütögetés és vibrálás.

- A funkció könnyű masszírozással indul. Az egyes funkciók közötti változtatáskor, a hirtelen túl erős stimuláció elkerülése végett a program mindig enyhe masszírozással indul, amely fokozatosan erősödik.

A folyadékkristályos kijelzőn látható szimbólumok az automata kezelési mód során



[VÁLL] automata kezelési mód



[DERÉK] automata kezelési mód



[KÉZ ÉS LÁBFEJ]
automata kezelési mód




[LÁBSZÁR ÉS KAR]
automata kezelési mód




[ÍZÜLETEK] automata kezelési mód

A folyadékkristályos kijelzőn látható szimbólumok manuális kezelési mód során

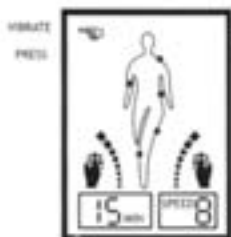


[VIBRÁLÁS] manuális kezelési mód

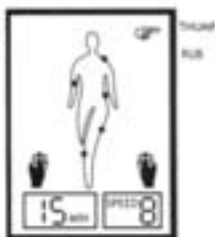


[ÜTÖGETÉS] manuális kezelési mód

Helyes használat

A masszírozó használata

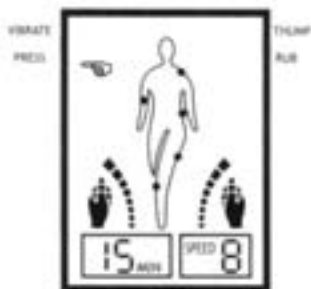

[NYOMKODÁS] manuális kezelési mód

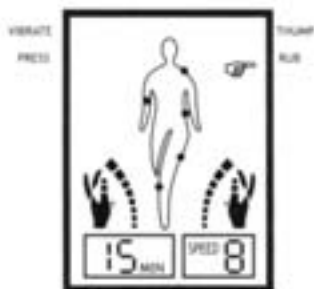

[MASSZÍROZÁS] manuális kezelési mód

Az elektródák elhelyezési pontjai



VÁLL



DERÉK



LÁB



KAR



ÍZÜLETEK



LÁBFEJ

• A készülék bekapcsolásakor automatikusan indul a masszírozó funkció



Megjegyzés: A masszírozó funkcióban kis szünetek vannak. Kérem, pontosan állítsa be az intenzitást. Kerülje az intenzitás hirtelen emelését.

A masszírozó használata

© 3. Az intenzitás és a sebesség beállítása

Fordítsa el az intenzitást szabályozó gombot, majd fokozatosan emelje az intenzitást az Önnek optimális állapot eléréséig.

Nyomja meg a sebességet szabályozó gombot a plusz jel irányában (+), a sebesség nő. Nyomja meg a sebességet szabályozó gombot a mínusz jel irányában (-), a sebesség csökken.

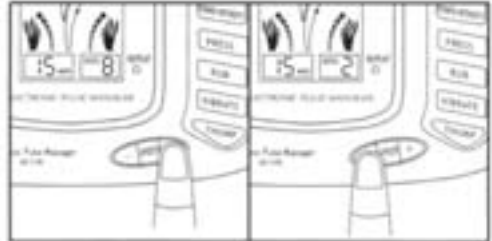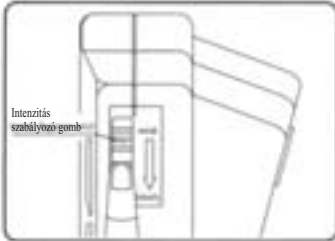

- Az intenzitás emelésével nem ér el kedvezőbb gyógyító hatást. A túlzott stimulációtól bőre kipirulhat, fájdalomérzet jelentkezhet
- Az intenzitás erőssége minden funkcióban állítható 1-8 közötti skálán.

Megjegyzés: Az Ütögető funkció használatakor az intenzitás szabályozása lassúbb ütemű. Legyen türelmes.



- A sebesség beállítása csak manuális kezelési módban lehetséges, 1-9 közötti skálán.

Megjegyzés: A biztonsága érdekében az intenzitást mindig lassan növelje, mivel a túl intenzív stimuláció kedvezőtlen hatású lehet.

© 4. Az ismétlő gomb használata

Automata kezelési módban az Ismétlőgomb megnyomásával a készülék az éppen folyamatban lévő stimulációt ismétli. (Az ismétlésjelző szimbólum villog.)

Ha az ismétlő funkciót be akarja fejezni, nyomja meg újra az Ismétlőgombot, az eredeti funkció folytatódik. (Az ismétlésjelző szimbólum nem villog tovább.)

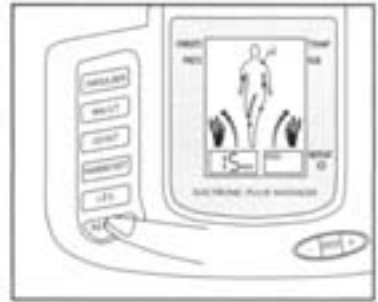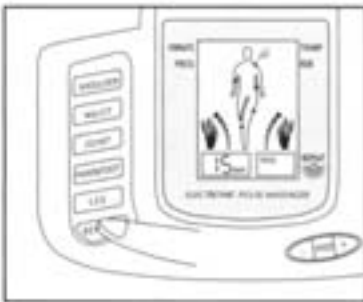


- Az Ismétlő funkció használata csak automata kezelési módban lehetséges.
Az Ismétlő funkció leállításához és az előző funkció folytatásához újra nyomja meg az Ismétlőgombot.

A masszírozó használata

© 5. A kezelés befejezésekor kapcsolja ki a készüléket

A készüléket a ki/bekapcsoló gomb órajárással ellentétes elfordításával lehet kikapcsolni.

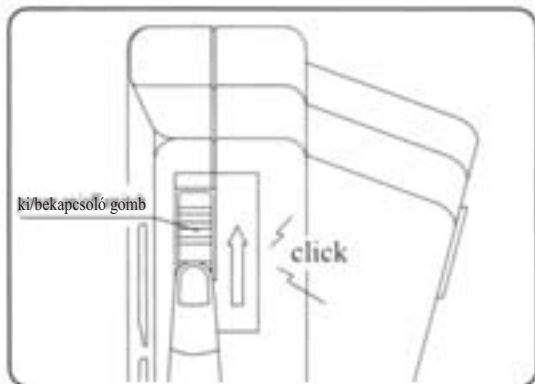

A készülék automatikus kikapcsolása esetén fordítsa el a Ki/bekapcsoló gombot „Kikapcsolva” („Off”) állásba. Amennyiben a Ki/bekapcsoló gomb a kezelés befejezésével is 'Bekapcsolva' ('On') állásban marad, az elemek gyorsan lemerülhetnek.

Ha a kezelési idő lejárata után tovább szeretné használni a készüléket, először kapcsolja ki a készüléket, majd ismételtén kapcsolja be.




Megjegyzés: A 15 perces kezelési idő automatikus befejezését követően ne felejtse el „Kikapcsolva” („Off”) állásba fordítani a Ki/bekapcsoló gombot, ellenkező esetben az elemek lemerülhetnek.

© 6. A készülék használatának befejezése

Húzza ki a csatlakozót az alapegységéből.

Tisztítsa meg a
lapelektrodákat.

Tegye az elektrodákat az
elektrodatartóba

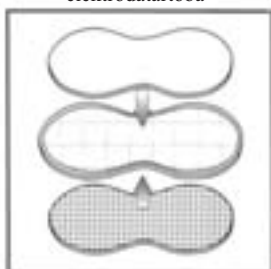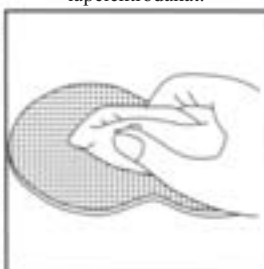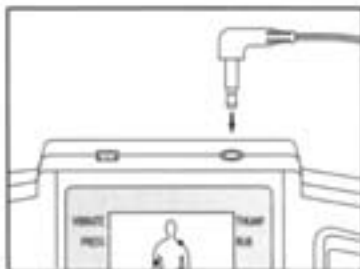

A csatlakozót az alapegységéből való kihúzáskor tartsa a kezében, ne húzza meg a kábelt.

Az elektrodák megtisztításához használjon tiszta vizet vagy nedves ruhát (arctörölő kendő vagy szivacs használata kerülendő).

Az elektrodákat finoman törölje át, vigyázva, hogy az elektrodák felülete ne karcolódjon meg.

Helyes használat

Karbantartás

© Az alapegység karbantartása

Az alapegység tisztítását végezze nedves pamutkendővel (használhat vizet vagy szappanos vizet).

Ne használjon a készülék tisztításához oldószert, illóolajat vagy alkoholt.



Ne tartsa vagy használja a masszírozót TV készülék vagy egyéb elektromos vagy elektromágneses erőterek közelében.




Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen napsugárzásnak.




Tartsa távol a készüléket gyermekektől.



Ne szerelje szét a készüléket. Óvakodjon a készülék leejtésétől vagy rázásától.

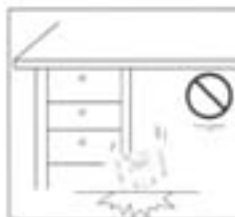

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vagy ha folyamatosan adapterrel használja, akkor távolítsa el az elemeket.

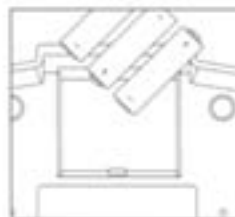

© A lepelektrodák karbantartása

Huzamosabb használat után a lepelektrodák bepíszkolódhatnak, így nehezebben tapadnak a bőrfelületre. Óvatosan tisztítsa meg az elektrodákat nedves kendővel, így ismét jól fognak tapadni.



Ne tegye ki az elektrodákat magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen napsugárzásnak.



Cserélje ki az elektrodákat, ha az alapos tisztítás ellenére sem tapadnak jól a bőrfelületre.

Üzemzavarok és megoldások

Üzemzavar	Lehetséges ok	Megoldás
Nem érzékeli a jelet	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Ellenőrizze az elemeket ⊗ Ellenőrizze az elemek behelyezését ⊗ Ellenőrizze az elektródakábel csatlakozását ⊗ Ellenőrizze, hogy eltávolította-e az átlátszó védőfóliát az elektródákról 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Cserélje ki az elemeket ⊗ Helyezze be az elemeket előírászerűen ⊗ Csatlakoztassa újra az elektródakábel ⊗ Távolítsa el a védőfóliát
A jel túl gyenge	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Ellenőrizze, hogy az elektródák a bőrhöz simulnak-e ⊗ Ellenőrizze, hogy az elektródák nem csúsztak-e egymásra ⊗ Tisztáz az elektródák? ⊗ Ellenőrizze az Intenzitás beállítását ⊗ Ellenőrizze az elektródák helyét 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Az elektródákat simítsa a bőrére ⊗ Válassza szét az elektródákat, simítsa újra a bőrére ⊗ Tisztítsa meg az elektródákat ⊗ Állítsa be az Intenzitásértéket ⊗ Változtassa meg az elektródák elhelyezését
A bőr kipirul Szúró fájdalomat érez	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Betartotta a kezelési időt? ⊗ Az elektródák elég nedvesek? ⊗ Ellenőrizze, hogy az elektródák a bőrhöz simulnak-e ⊗ Tisztáz az elektródák? ⊗ Ellenőrizze, hogy nincsenek-e karcolások az elektródákon 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ 10-15 perc kezelés után ellenőrizze a bőrt ⊗ Törölje át az elektródákat nedves ruhával ⊗ Az elektródákat simítsa a bőrére ⊗ Tisztítsa meg az elektródákat ⊗ Cserélje ki az elektródákat
A kezelés alatt az áram kikapcsol	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Ellenőrizze, hogy az elektródák jól tapadnak-e a bőréhez ⊗ Ellenőrizze az elektródakábelek csatlakozását ⊗ Ellenőrizze az elemeket ⊗ Eltelt már 15 perc a kezelés megkezdése óta? 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Kapsolja ki a készüléket és helyezze az elektródákat szoroson a bőrére ⊗ Kapsolja ki a készüléket és csatlakoztassa az elektródakábelek ⊗ Ha az elemek lemerültek, cserélje ki újakra 15 perc után a készülék automatikusan kikapcsol

Ne használja a készüléket!

Ha olyan üzemzavar keletkezik, amelyet nem tud megoldani a fenti táblázat alapján, vigye szervizbe a készüléket!

A készülék műszaki jellemzői

Elektronikus Masszírozó	
Típus	AD-2100
Energiaellátás	DC4V adapter (tartozék), vagy 3 db 1,5 V AAA szárazelem
Frekvencia	2~1000 Hz
Áramfelvétel	kb. 40mA (ellenállás: 500 Ω)
Az elemek élettartama	napi 15 perces használatlalt kb. 3 hónap
A készülék mérete	1500 mm x 100 mm x 46 mm
A készülék tömege	kb. 200 g (szárazelemek nélkül)
Normális üzemeltetési feltételek	hőmérséklet: 5–55°C
	páratartalom: <80%
Tárolási és szállítási szabályok	hőmérséklet: –20–55°C
	páratartalom: <10–95%
Biztonsági osztály	II. oszt. BF

A lapelektrodák elhelyezkedési pontjai

© Váll és hát

Panasz:

fájdalomérzet vagy tompa fájdalom a vállakban és a hátban.

Példák az elektronikus masszírozó lapelektrodáinak felhelyezésére.



Tegye fel az elektrodákat az alábbi képnek megfelelő módon, ez gyógyító hatású fájó vállak esetén.

Az automata üzemmód „ütegető” programja enyhíti a fájdalmat.

A kezelés gyógyhatása a vállakra



A lapelektrodák elhelyezkedési pontjai

© Derék

Panasz:

Feszítő fájdalom a derék izmaiban

Példák az elektronikus masszírozó lapelektrodáinak felhelyezésére.



Tegye fel az elektrodákat az alábbi képek megfelelő módon, ez gyógyító hatású fájó derék esetén.

Az automata üzemmód „ütegető” programja enyhíti a fájdalmat.

A kezelés gyógyhatása a derékra



A lapelektrodák elhelyezkedési pontjai

© Kar

Panasz:

Szúró fájdalom a karban, tompa
fájdalom a karizmokban.

Példák az elektronikus masszírozó
lapelektrodáinak felhelyezésére.



Tegye fel az elektrodákat az alábbi képnek
megfelelő módon, ez gyógyító hatású fájó
karok esetén.

Az automata üzemmód „ütegető”
programja enyhíti a fájdalmat.

A kezelés gyógyhatása a karokra



A lapelektrodák elhelyezkedési pontjai

© Láb

Panasz:

Fáradtságérzet és fájdalom a lábokban.

Példák az elektronikus masszírozó lapelektrodáinak felhelyezésére.



Tegye fel az elektródákat a combcsontok vagy a lábszárcsontok vonalában, vagy a fájó pontokra, ez gyógyító hatású fájo láb esetén.

Az automata üzemmód „vibrálás” programja enyhíti a fájdalmat.

A kezelés gyógyhatása a lábakra



A lapelektrodák elhelyezkedési pontjai

© Ízületek

Panasz:

Fájdalom a kar vagy a lábízületekben.

Példák az elektronikus masszírozó lapelektrodáinak felhelyezésére.



Tegye fel az elektrodákat a kar-, a lábszár- vagy a combcsontok vonalában, vagy a fájó pontokra, ez gyógyító hatású fájdalmas ízületek esetén.

Az automata üzemmód „ütőgető” programja enyhíti a fájdalmat.

A kezelés gyógyhatása az ízületekre.



A lapelektrodák elhelyezkedési pontjai

© Más testrészek

Panasz:

a testrészt hidegnek érezzük, ödéma, fáradt lábfej, bármely testrészben érzett fájdalom vagy szúró fájdalom

Példák az elektronikus masszírozó lapelektrodáinak felhelyezésére.

Tegye fel az elektródákat az alábbi képnek megfelelő módon, ez gyógyító hatású ödéma vagy fájó lábfej esetén.

Az automata üzemmód „ütegető” programja enyhíti a fájdalmat.

A kezelés gyógyhatása a lábfejre.



Garancia és javítási jegyzék

Az erre a készülékre érvényesített garanciajegy és a vásárlási blokk, számla megléte, valamint rendeltetésszerű használat esetén a MEDICOR Elektronika Zrt. a vásárlás napjától számított egy év garanciát vállal. Ezen időtartam alatt a készüléket személyesen, vagy postán lehet eljuttatni a márkaszervizbe (1097 Budapest, Illatos út 9.). A postaköltség a Vevőt terheli.

DÁTUM	HIBA MEGNEVEZÉSE	SZERVIZ ALÁÍRÁSA/PH.
Garanciális Szabályok	1. A garanciális időszak alatt – a 2. pontban leírtak figyelembevételével – a készülék megjavítását a márkaszerviz (MEDICOR Elektronika Zrt. 1097 Budapest, Illatos út 9, Tel: /1/ 280-6900/119 m., 348-0717, Fax:/1/ 280-6336) ingyen végzi el. 2. A garancia az alábbi esetekben érvényét veszti és a javítás költségét a szerviznek ki kell fizetni: 1. A kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő üzemeltetés. 2. A helytelen kezelésből eredő sérülés. 3. A készülék szerkezetén bármilyen önkényes módosítás vagy javítás. 4. Korrodált vagy sérült elem által okozott meghibásodás. 5. Természeti esemény vagy egyéb szerencsétlenség által okozott meghibásodás.	

A szerviz megközelítése



Szerviz:

MEDICOR Elektronika Zrt.

1097 Budapest, Illatos út 9.

Tel.: 06-1-280-6900/119

06-1-348-0717

Fax: 06-1-280-6336

