

Garancia és javítási jegyzék:

A KD-575 típusú vérnyomásmérőre érvényesített garanciajegy és a vásárlási nyugta, vagy számla megléte, valamint rendeltetészerű használat esetén a **MEDICOR Elektronika Zrt.** a vásárlás napjától számított egy év garanciát vállal. Ezen időtartam alatt a készüléket személyesen, vagy egyéb úton lehet eljuttatni a márkaszervizbe.

Az esetleges csomagszállítás díja a Vevőt terheli.

Dátum	Hiba megnevezése	Szerviz aláírás/PH.
Garanciális szabályok	<ol style="list-style-type: none">1. A garanciális időszak alatt – a 2. Pontban leírtak figyelembevételével – a vérnyomásmérő javítását a márkaszerviz (MEDICOR Elektronika Zrt., 1097 Budapest, Illatos út 9.) ingyenesen végzi el.2. A garancia az alábbi esetekben érvényét veszti és a javítás költségét a szerviz részére ki kell fizetni.<ul style="list-style-type: none">- A kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő üzemeltetés.- A helytelen kezeléssel eredő sérülés.- A készülék szerkezetén bármilyen önkényes módosítás vagy javítás.- Korrodált vagy sérült elem által okozott meghibásodás.- Természeti esemény vagy egyéb szerencsétlenség által okozott meghibásodás.	

A gyártó a műszaki változtatás jogát fenntartja.

Ez a készülék eleget tesz az MDD 93/42 EEC gyógyászati eszközök irányelvi alapvető követelményeinek és ezért jogosan viseli a CE0197 konformitási jelet.

- 4 -

5.695.0070.00.9a

KD-575 típusú felkaron mérő, digitális, automata vérnyomásmérő

Használati útmutató és jótállási jegy

Gyártási szám:

Értékesítés dátuma:

Aláírás/ph.

Forgalomba hozza:



MEDICOR

MEDICOR Elektronika Zrt.

1097 Budapest, Illatos út 9.

Vevőszolgálat tel.: 06/1 280-1792

Szerviz telefonsz.: 06/1 348-0717

<http://www.medicor.hu>

E-mail: rendeles@medicor.hu

CE0197

5.695.0070.00.9a

Köszönjük, hogy a KD-575 típusú vérnyomásmérő készüléket választotta. A mandzsetta felfújása, a mérés és a nyomás csökkentése teljesen automatikus. A készülék négy személy 30 méréseredményét képes rögzíteni.

A mérés előtt pihenjen 5-10 percet, nyugodt, ülő helyzetben. A mérés alatt ne beszéljen, ne mozogjon!

Szívrítmus zavarban szenvedő páciensek részére a vérnyomásmérő használata nem ajánlott.

A mérés menete:

- Távolítsa el a készülék hátoldalán lévő elemfedelelet, helyezzen be 4 db azonos típusú LR6 1,5V AA alkaline elemet, ügyelve a jelölt polarításra, majd helyezze vissza az elemfedelelet.
- A mandzsettát csatlakoztassa a vérnyomásmérő bal oldalán lévő nyílásba, helyezze fel - lehetőleg - bal felkarjára, 1-2 cm-rel könyökhajlata fölé (a gumicső is a könyökhajlat felett legyen), majd a tépőzárral rögzítse úgy, hogy a mandzsetta ne legyen se túl szoros, se túl laza.
- Miután kényelembe helyezte magát, nyomja meg a „START” gombot (kb. 1 másodpercig folyamatosan), amíg a készülék bekapcsol, sípszó hallatszik.
- A „START” gomb ismételt rövid megnyomásával a készülék megkezdí a felpumpálást. Magas vérnyomás esetén a motor többször indulhat. Megfelelő nyomásérték elérése után automatikusan megkezdődí a mérés.
- Befejezéskor a vérnyomásmérő kijelzője mutatja a mért szisztolés, diasztolés értéket (mmHg) és a percnkénti pulzusszámot, ekkor villog a „MEM” felirat. A „+” illetve a „-” gombok lenyomásával beállíthatjuk, hogy melyik csoportba (A, B, C, D,) rögzítjük a mért értéket, majd a „MODE” gomb megnyomásával fejezzük be az adat tárolását. (Ekkor „SA” felirat látszik.)
- A „START” gomb folyamatos nyomásával (kb. 3 másodpercig) a készülék kikapcsol.

Memória funkció:

- Nyomja meg az „START” gombot (kb. 1 másodpercig folyamatosan), amíg a készülék bekapcsol, sípszó hallatszik.
- Nyomja meg kétszer a „MODE” gombot.
- A „+” illetve a „-” gombok lenyomásával válassza ki a csoport betűjelét (A, B, C, D,), melynek adatait meg szeretné nézni, majd ismét nyomja meg a „MODE” gombot.
- Ezután a hívhatóak vissza a „+” illetve a „-” gombok lenyomásával a rögzített mérések eredményei.
- A csoportokban a 31. mérésnél a mért érték eltárolódik, miközben a legrégebben mért érték automatikusan törlődik.
- A vérnyomásmérő kikapcsolásához nyomja meg az „START” gombot folyamatosan (kb. 3 másodpercig).

A dátum és az idő jelzésének beállítása:

- Amikor a vérnyomásmérő ki van kapcsolva, nyomjuk meg a „MODE” gombot, amíg nem villog a hónap („M”-month) felirat melletti szám, majd nyomjuk meg a „+” illetve a „-” gombokat a megfelelő adat beállításához. Ezután hasonló sorrendben a nap („D”-day), majd az óra és perc beállítását végezhethetjük el.
- A négy adat beállítása után nyomjuk meg a „MODE” gombot, ezután az adatokat a készülék rögzíti.

FIGYELEM: Amennyiben adaptert csatlakoztatunk a vérnyomásmérőhöz, az adatok (dátum, idő) 10 másodperc után elveszhetnek.

A KD-575 típusú készülékhez csak MEDAP-4 típusú adapter csatlakoztatható!

Ha más típusú adaptert csatlakoztatnak hozzá, maradandó károkat okozhat és a garancia elvesztésével jár!

- A vérnyomásmérőhöz nem ajánljuk akkumulátor használatát!
- A készülék működését megzavarhatja interferencia vagy elektromágneses sugárzás!