


4.2 Fűhőmérséklet mérés:

- Megjegyzés:**
- Javasolt 3 mérést végezni ugyanabban a fülben. Ha a 3 mérés értéke eltér, a legmagasabbat vegye alapul.
 - A keresztfertőzések elkerüléséhez tisztítsa meg minden mérést követően a mérőfejet a „Karbantartás és tisztítás” pontnak megfelelően.

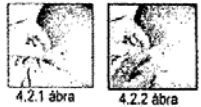

4.2.1 Vegye le az (A) mérőveget. Gyengéden húzza hátra a fület a hallójárat kiengyesítéséhez (4.2.1 ábra), és határozottan helyezze be a mérőfejet a hallójáratba a dobhártyát minél jobban megközelítve, hogy pontos értéket kapjon (4.2.2 ábra).
4.2.2 Tartsa nyomva a „SCAN” gombot, amíg csipogást nem hall. Vegye el a fülőtől a készüléket és olvassa le az eredményt az LCD kijelzőről.

4.3 Hőmérséklet mérés Scan Módban:

- Ha megnyomja a „SCAN” gombot, azonnal leolvashatja az aktuális hőmérsékletet. Ha a „SCAN” gombot nyomva tartja, a mért értékek folyamatosan frissülnek.
 - A készülékkel mérhető víz, tej, ruha, bőr stb. hőmérséklete.
- * Megjegyzés:** Ebben a módban a valós, konvertálatlan hőmérséklet érték látható, mely különbözik a homlok módban mutatott értéktől.

4.4 Szobahőmérséklet mérés

- A szobahőmérséklet mutatójához helyezze a készüléket az asztalra, kerülve a közvetlen napfényt vagy a légkondicionáló levegőáramlatot.
- Kikapcsolt állapotban a kijelzőn a szobahőmérséklet látható a hőmérő ikon kíséretében.
- A mutatót szobahőmérséklet 15 perc elteltével válik reálisá.

5. Mérés után

- Kikapcsolás: A hőmérő egy perc után automatikusan kikapcsol, meghosszabbítva ezzel az elem élettartamát. A kijelző csak a dátumot, időt és a szobahőmérsékletet mutatja.
- Minden mérés után tisztítsa meg a mérőfejet és a lencsét a pontos eredményhez, és a keresztfertőzések elkerüléséhez (lásd a „Tisztítás és Karbantartás” pontot).
- Használat után ne felejtse el visszatenni a mérőfej védő kupakot.

5.1 Jótállási feltételek

- Tartsa nyomva az „ON/MEM” gombot, és nyomja meg a „SCAN” gombot kétszer a „Stopper” módhoz.
- A stopper indításához vagy leállításához nyomja meg a „SCAN” gombot, a nullázáshoz az „ON/MEM” gombot.
- Tartsa nyomva az „ON/MEM” gombot, és nyomja meg a „SCAN” gombot egyszer a „Homlok” módba való visszalépéshez.
- Pulzuszám: Számolja pulzusát 15 mp-ig a stopperrel mérve az időt, majd a kapott számot szorozza 4-gyel a percnkénti pulzuszámhoz.



5.2 Karbantartás és tisztítás

- A mérőfej a készülék legkényesebb része. Óvatosan tisztítsa, vigyázva a lencse épségére.**
- A használatot követően alkoholos (max 70%-os) vattával vagy nedves pamut ruhával tisztítsa meg a mérőveget és a lencsét.
 - Hagyja a lencsét teljesen megszáradni legalább 30 percig.
 - Tartsa a készüléket távol folyadéktól és közvetlen napfénytől.
 - Tárolási hőmérséklet: -20-50°C (-4-122°F)
- A készülék a túl sokáig kézben tartással melegszik, és így magasabb környezeti hőmérsékletet érzékel. Méréskor ez a valószínűleg alacsonyabb test hőmérséklet értéket eredményezhet, ezért ne tartsa kezében túl sokáig.**



5.3 Elemcsere

- Nyissa ki az elemtartó fedelet. Nyomjon egy hegyes tárgyat (pl. toll) az elemfedél nyílásába. Ezzel egyidejűleg hűvölküjével tojja le a fedelet.
 - Tartsa kezében a készüléket, és paltítsa ki az elemet egy kis csavarhúzóval.
 - Helyezze be az új elemet a fém érintkezőbe kattanásig.
* A pozitív (+) pólus felfelé, a negatív (-) pólus lefelé álljon.
 - Helyezze vissza az elemtartó fedelet.
- Az elemet tartsa távol gyermekektől. A készülék tartozéka 1 db lítium gombelem (CR2032).**



Hiba Üzenet	Hibaüzenet jelentése	Hibaelhárítás
Er1	Mérés történi a készülék készenléte állása előtt.	Várja meg, amíg az összes ikon villogása megszűnik.
Er2	A hőmérő gyors környezeti hőmérséklet-változást érzékel.	Hagyja legalább 30 percig, hogy a hőmérő felvegye a szobahőmérsékletet: 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
Er3	A környezeti hőmérséklet nem az előírt 10°C - 40°C (50°F - 104°F) közötti.	Hagyja legalább 30 percig, hogy a hőmérő felvegye a szobahőmérsékletet: 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
Er	5-9 hibakód esetén a készülék nem megfelelően működik.	Vegye ki az elemet, várjon 1 percet, majd helyezze vissza. Ha a hibakód továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.
H1	(1) Fül/Homlok módban: A mért hőmérséklet magasabb +42.2°C-nál. (2) Scan módban: A mért hőmérséklet magasabb +80°C-nál.	A mérendő felületet a tartománynak megfelelően válassza meg. Ha a rendelkezesség továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.
Lo	(1) Fül/Homlok módban: A mért hőmérséklet alacsonyabb -34°C-nál. (2) Scan módban: A mért hőmérséklet alacsonyabb -22°C-nál.	A mérendő felületet a tartománynak megfelelően válassza meg. Ha a rendelkezesség továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.
1888	A készülék nem lép mérésre kész állapotba.	Cserélje ki az elemet újra.

Jótállás

A termékre a vásárlás napjától számított 12 hónapig jótállást vállalunk a 151/2003. (IX.22.) rendelet szerinti. A kiegészítő elemekre a garancia nem vonatkozik. A kiadott jótállási jegy csak számaival együtt érvényesül. A készülék jótállása érvényét veszti rendellenes használat, szakszerűtlen kezelés, illetéktelen személy általi beavatkozás, hirtelen tárolás, elemi kár vagy a gyártó hibáiban kívüli eső egyéb meghibásodás esetén.

GARANCIÁLIS JÓTÁLLÁSI JEGY

A JÓTÁLLÁSI JEGYEN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Az előző starv köteles a vásárlás napját feltüntetni a jótállási jegyen előírt rovatban. A jótállási jegy érvényesítésénél a jótállást vállaló csak az előadás napjának hitel érdemű (dátummal és helyszínnel ellátott) száma vagy eladási jegyzék) igazolásával köteles pótolni a jótállási jegyet, illetve a jótállást érvényesíteni.

A JÓTÁLLÁSI JEGY ALAPJÁN A VEVŐK FELE VÁLLALTI KÖTELEZETTSÉGEK

A jótállási jegyen a vevő által történt bármilyen szabálytalan módosítás, törés vagy sérülés, valamint adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Az előző mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy az előadás után a meghibásodás az alábbi okok miatt keletkezett, illetve következett be: - rendellenes használat - szakszerűtlen kezelés, - idegen, illetéktelen beavatkozás, - hirtelen tárolás, - elemi kár, - a gyártó hibáiban kívül más ok következménye esetében (pl. tisztítás).

A szabálytalan használat elkerülése céljából kérjük, tanulmányozza át a készülékhez mellékelt használati utasítást. Kérjük, tartsa be a használati utasítás - használati, tárolási, tárolási, tisztítási stb. kapcsolatos előírásait. Ezek be nem tartása esetén a készülék jótállást nem vállalunk. Ha a hiba jellegével, természetével kapcsolatban vita keletkezik, és amennyiben az igény a javító szerviz részéről nem rendeződne, úgy a Kereskedelmi Készenléti Szolgálatunkhoz fordulhat. A jótállási igény a 49/2003. (VI.30) GRM rendelet szerint kerül rendezésre.

A FOGYASZTÓ JOGA ÉS KÖTELEZETTSÉGE:

- A fogyasztó a jótállási jegyen felüntetett szerviznél, illetve vevői vásárló esetén a vásárlási helyen lehet meg a hiba bejelentését. A termék kijavítása esetén a jótállási időtartam meghosszabbodik a hiba közlésétől kezdve azaz az idővel, amely a jótállás időtartamát meg meghaladja.

A TERMÉK CSERÉJE KÉRHETŐ:

Ha a garancia ideje alatt a termék - meghibásodása miatt a fogyasztó 3 munkanapon belül érvényesíti cseréigényét, illetve, hogy a meghibásodás a rendelkezés szerinti használatot akadályozza - valamilyen oknál fogva nem javítható, - a javítás után nem válik használhatóvá, - a javítás időtartama 30 nappal hosszabb, a vevő kívánására azonos típusú új termékre kell kicserélni, vagy ha erre nincs mód, a termék vételárát vissza kell téríteni. A csereire jogosult igazolást mindenkor a szerviz adja ki. A vásárlót a Polgári Törvényről szóló 1959. évi IV. tv. 306-308. paragrafusai és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. Jelen jótállási és fogyasztó más törvényből eredő jogait nem érinti.

GARANCIÁLIS JÓTÁLLÁSI JEGY MEGHIBÁSODÁS ESETÉN A TERMÉKET EZZEL A GARANCIAJEGGYEL KÉRJÜK A SZERVIZ RÉSZÉRE ELJUTTATNI

Eladó szerv:

AZ ELADÓ SZERV ÁLTAL TÖLTENDŐ KI

Vásárlás dátuma:

Gyártó: Radiant Innovation Inc. Add: 1F, No.3, Industrial East 9th Road, Science-Based Industrial Park, HsinChu, Taiwan 300

Forgalmazó és szerviz: Dealtch Hungary Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel/Fax: +36-1-481-9507
e-mail: dealtch@interware.hu; www.dealtch.hu

